


CLC Extraxtor Kit: Estrattore per viti rotte

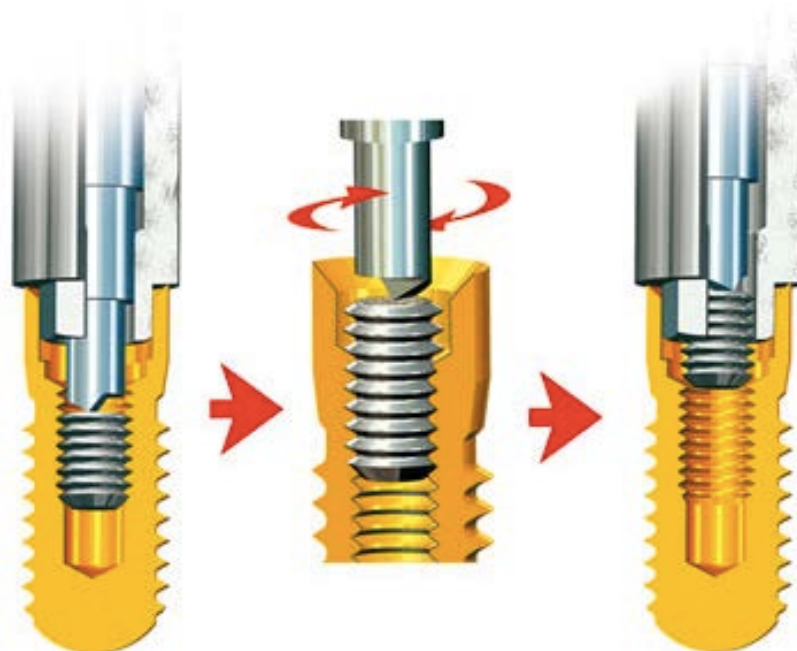

CLC SCIENTIFIC è lieta di annunciare il CLC Extraxtor Kit, ovvero il kit per l'estrazione di frammenti di viti protesiche di ritenzione CLC Conic . Con il sistema CLC Extractor Kit, si può togliere dall'impianto il frammento di vite rotta, qualora la vite non sia stata fissata con qualche tipo di cemento o non sia stata manomessa nel tentativo di estrarla, deteriorando così la parte filettata all'interno della fixture. Se il frammento della vite non è bloccato, inserendo all'interno dell'impianto il "centratore" e usando la fresa ad ARTIGLIO si riesce a svitare il residuo di vite. Quando invece il frammento della vite risulta bloccato, si deve utilizzare, sempre attraverso il centratore, la fresa SPECIALE PERFORANTE, con la quale si riesce a consumare il pezzo di vite bloccata.

Il CLC Extractor Kit è utilizzabile con tutti gli impianti CLC CONIC, dal diametro 3,5 mm sino a quello di 6 mm

Ogni CLC Extractor Kit contiene:

- 1 fresa ad artiglio
- 1 fresa speciale perforante
- 1 centratore manuale

Prezzo di vendita del CLC Extractor Kit: 280 € + IVA

Per maggiori informazioni contattate il Vostro Rappresentante CLC SCIENTIFIC